


Instrukcja użycia

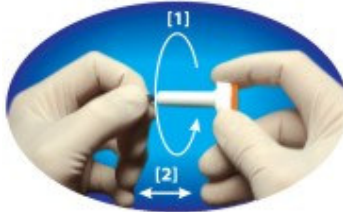

Usuń osłonę ostrza przekręcając ją uprzednio o 360° (pełen obrót).

Uwaga! Nie aktywuj przycisku przed zdjęciem osłony.



Przyłóż nakłuwacz do miejsca nakłucia a następnie zdecydowanym ruchem naciśnij kciukiem przycisk nakłuwacza.



W celu uzyskania wymaganej ilości krwi zastosuj przerywany nacisk na miejsce w pobliżu nakłucia

Wskazówki:

1. Pacjent powinien umyć dłonie ciepłą wodą i mydłem przed wykonaniem testu. Pamiętaj, że rozgrzanie dłoni poprawia krwiotok, co przyczynia się do zwiększenia próbki krwi.
2. Preferowane miejsca nakłucia to boczna część opuszka palca - to miejsca nakłucia wpływa na minimalizację bólu oraz maksymalizację wielkości próbki krwi.
3. Sugeruje się, aby dłoń pacjenta znajdowała się poniżej łokcia co pozwoli na dopływ krwi do opuszka palca.
4. Po pobraniu próbki krwi, zastosować ucisk na miejsce nakłucia przez materiał opatrunkowy.