

# MEDLANCE<sup>®</sup> plus

## Bezpieczeństwo i pełna kontrola

● **Optymalny:** użycie nakłuwacza Medlance<sup>®</sup> plus pozwala na pobranie optymalnej ilości krwi. Wystarczy jedno nakłucie!

● **Łatwy w użyciu:** intuicyjna obsługa nakłuwacza Medlance<sup>®</sup> plus sprawia, że pobieranie próbek krwi staje się niezwykle proste.

● **Sterylny:** igła nakłuwacza jest sterylizowana promieniami Gamma.

CE 0344

### Comfort MAX

● **Delikatny:** nakłuwacz bezpieczny Medlance<sup>®</sup> plus posiada ostrą, wykonaną z nierdzewnej stali igłę, która podczas aktywacji przyjmuje właściwą pozycję do wykonania nakłucia.

● **Bezpieczny:** specjalna konstrukcja nakłuwacza Medlance<sup>®</sup> plus chroni przed jego ponownym użyciem. Igła nakłuwacza pozostaje ukryta przed i po aktywacji, zapobiegając tym samym przypadkowemu skłeczeniu.



Opakowanie  
200 szt.

# MEDLANCE<sup>®</sup> plus



**HTL** STREFA  
high tech lab

HTL-STREFA S.A.  
Adamówek 7,  
95-035 Ozorków, Poland  
T: +48 22 587 05 71, F: +48 22 811 05 36  
info@htl-strefa.pl • www.htl-strefa.pl



553-556/MP/PL/08/2011\_rev.1

# MEDLANCE<sup>®</sup> plus


## Nakłuwacze bezpieczne



# MEDLANCE<sup>®</sup> *plus*

## Instrukcja obsługi

### 1. Przekręć

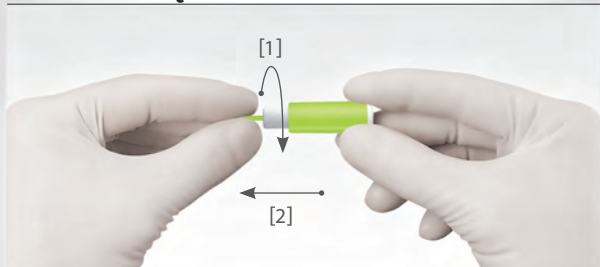

Trzymając obudowę nakłuwacza przekręć osłonkę igły o 90° i następnie ją wyciągnij.

### 2. Naciśnij



Przyłóż nakłuwacz Medlance<sup>®</sup> plus do miejsca nakłucia i przyciśnij. Zużyty nakłuwacz wyrzuć do pojemnika na odpady medyczne.

### 3. Pobierz próbkę



Aby uzyskać wymaganą ilość krwi, delikatnie uciskaj miejsce obok nakłucia.

**30G**  
OSTRZE

Głębokość nakłucia  
**1.2 mm**

**Comfort**  
**MAX**



**Medlance<sup>®</sup> plus**  
*SuperLite*

Nr kat.: 7241  
Opakowanie 200 szt.

**25G**  
IGŁA

Głębokość nakłucia  
**1.5 mm**



**Medlance<sup>®</sup> plus**  
*Lite*

Nr kat.: 7043  
Opakowanie 200 szt.

**21G**  
IGŁA

Głębokość nakłucia  
**1.8 mm**



**Medlance<sup>®</sup> plus**  
*Universal*

Nr kat.: 7044  
Opakowanie 200 szt.

**21G**  
IGŁA

Głębokość nakłucia  
**2.4 mm**



**Medlance<sup>®</sup> plus**  
*Extra*

Nr kat.: 7045  
Opakowanie 200 szt.

**0.8mm**  
NOŻYK

Głębokość nakłucia  
**2 mm**



**Medlance<sup>®</sup> plus**  
*Special*

Nr kat.: 7046  
Opakowanie 200 szt.

Ultracienka igła przeznaczona dla dzieci i dorosłych z bardzo delikatną skórą. Optymalna ilość krwi do badania poziomu glukozy we krwi przy pomocy nowoczesnych urządzeń.



Pomiary poziomu glukozy u dorosłych z normalną i delikatną skórą dłoni oraz u dzieci.



Standardowe pobrania krwi kapilarnej u dorosłych. Pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Badanie krzepności krwi i badania gazometryczne.



Większe próbki krwi oraz dorośli z twardszą skórą dłoni (w szczególności pracownicy fizyczni). Pomiary poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, badanie krzepności krwi itp.



Nakłucia palca u dorosłych przy zapotrzebowaniu na większą próbkę krwi. Badanie krzepności krwi, badania gazometryczne i przesiewowe HBO i HIV.

